

محدودیتها

• نتیجه آزمایش بعد از ۱۵ دقیقه اعتباری ندارد.
• داروهائی که حاوی hCG می باشند، می توانند بر نتیجه آزمایش تاثیر بگذارند.

• نمونه ادرار خیلی رفیق ممکن است میزان hCG را نشان ندهد، اگر هنوز مشکوک به بارداری هستید، بعد از ۴۸ ساعت اولین نمونه ادرار صبح را جمع آوری کرده و آزمایش را انجام دهید.

• این آزمایش ممکن است نتایج مثبت کاذب نشان دهد، به غیر از بارداری بعضی از موارد دیگر مثل تومورهای شامل: سرطان سینه، سرطان ریه و رشد غیر عادی سلولها در رحم که باعث بالا رفتن میزان hCG می شود، بنابر این در این موارد وجود hCG در نمونه ادرار دلیلی بر بارداری بودن نیست.. در صورت داشتن این گونه بیماری ها یا پزشک خود مشورت نمایید.

• این آزمایش ممکن است نتایج منفی اشتباهی را نشان دهد. نتایج منفی اشتباه ممکن است هنگامی که میزان hCG کمتر از سطح حساسیت این تست است، اتفاق افتد. چنانچه هنوز مشکوک به بارداری هستید، ۴۸ ساعت بعد، اولین نمونه ادرار صبح را جمع آوری و آزمایش را با دقت بیشتری تکرار کنید. اگر مشکوک به بارداری هستید و آزمایش دوباره نتایج منفی را نشان داد، برای تشخیص به پزشک خود مراجعه نمایید.

• نمونه ادرار بیمارانی که برای تشخیص یا درمان، فرآورده های مونوکلونال آنتی بادی دریافت کرده اند، ممکن است حاوی HAMa (human anti-mouse antibodies) باشد. ممکن است جواب آزمایش اینگونه افراد مثبت یا منفی باشد. اگر شما تحت این گونه درمان و تشخیص هستید، با پزشک خود مشورت کنید.

هشدارها و احتیاط

• برای استفاده با دقت دستور العمل را بخوانید. • فقط استفاده تشخیصی در خارج از بدن انسان دارد. • تست تا زمان استفاده باید در بسته بندی نگهداری شود. • اگر جعبه تست آسیب دیده یا باز بود از آن استفاده نکنید. • بسته تستی را که تاریخ انقضای آن گذشته است، استفاده نکنید. • تست بیکار مصرف است، دوباره آن را استفاده نکنید. • در دمای ۴-۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. • از یخ زدگی محافظت شود. دور از نور مستقیم خورشید، رطوبت، گرما، اشعه نگهداری شود. • تست کستنه یا باز نشود. • دور از دسترس اطفال نگهداری شود. • به عنوان پسماند زیستی دور انداخته شود. • این تست برای تشخیص احتمالی بارداری تهیه شده است. • تشخیص قطعی بارداری پس از بررسی کلیه یافته های کلینیکی و آزمایشگاهی صرفا توسط پزشک امکان پذیر است.

اطلاعات فنی

اسم و کد محصول : ۰۱/ THCG / TOYO Cassette Test

موارد استفاده : تشخیصی hCG در ادرار زنان برای تشخیص بارداری

وسایل آزمایش : یک بسته تست ، قطره چکان ، دستورالعمل استفاده (به توضیحات در صفحه قبل مراجعه نمائید)

وسایل مورد نیاز : ظرف ادرار ، زمان سنج

خلاصه : هورمون hCG یک sialoglycoprotein با وزن مولکولی حدود ۴۶۰۰۰ دالتون می باشد. هورمون hCG در ابتدا توسط سلولهای trophoblastic از جفت، پس از مدت کوتاهی از لانه گزینی تخمک در دیواره رحم ترشح می شود و چون پس از مدت کوتاهی غلظت هورمون hCG در ادرار و سرم ، در طول مراحل اولیه بارداری افزایش پیدا می کند. بنابراین هورمون hCG نشانگر مناسبی برای تعیین اولیه بارداری می باشد.

روش و عملکرد: ادراری که از انتهای جاذب وسیله تست جذب می گردد، ابتدا از قسمتی که حاوی monoclonal anti-hCG antibody conjugate of colloidal gold عبور می کند. ادرار سپس از قسمت mouse monoclonal anti-hCG antibody تثبیت شده در ساختار تست عبور کرده ، hCG موجود در ادرار به این قسمت متصل شده و تشکیل خط رنگی قابل رویت میدهد. آنتی بادی کنترل، goat anti-mouse IgG polyclonal antibody و colloidal gold conjugated antibody خود بخود پیوند یافته و تشکیل خط دوم رنگی را می دهند که نشانه معتبر بودن آزمایش است.

روش نگهداری و مدت زمان : در دمای ۴-۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود. دور از نور مستقیم خورشید، رطوبت، گرما، اشعه نگهداری شود. حداکثر تا یک ساعت بعد از باز کردن جعبه از آن استفاده شود. تست در جعبه اصلی تا زمان انقضاء در شرایط نگهداری مطلوب قابل استفاده خواهد بود.

وسایل مورد نیاز برای آزمایش : تنها ادرار تازه انسان ، نیاز به هیچ آمادگی خاصی نیست.

جمع آوری نمونه : نمونه ادرار باید در ظرف خشک و تمیز، بدون هیچ ترکیب شیمیایی یا نگه دارنده جمع آوری شود. می توان نمونه ادرار را در هر ساعت از روز گرفت اگر چه اولین ادرار صبح که معمولا شامل بالاترین مقدار hCG است ترجیح داده می شود.

معیار های مورد نظر: انتظار می رود در زنان غیر باردار و مردان سالم نتیجه تست منفی باشد. زنان باردار در نمونه ادرار و خونشان hCG وجود دارد. مقدار hCG در دوران مختلف بارداری و بین افراد نیز بسیار متفاوت خواهد بود. حساسیت این تست ۲۵mIU/mL تا ادرار است و این تست قادر است از ۴ روز قبل از شروع دوره قاعدگی مورد انتظار ، بارداری را تشخیص دهد.

ویژگیها و توانمندی: Cut off : ۲۵ IUhCG/L

اثر hook ندارد (اندازه گیری تا ۲۰۰۰۰ IUhCG/L)

با هورمونهای گلیکو پروتئین دیگر مانند: hFSH, LH, hTSH هیچ گونه اثر متقابلی یا واکنشی ندارد.

حساسیت : ۹۹/۹۸٪

ویژگی : ۱۰۰٪

(+) ارزش پیش بینی : ۱۰۰٪

(-) ارزش پیش بینی : ۹۸/۹۹٪

نتیجه		آزمایش
مثبت	منفی	
415	0	266
3	266	

واکنشگر ها : Mouse monoclonal anti-hCG antibody, goat anti-mouse IgG polyclonal antibody, colloidal gold conjugate of monoclonal anti-hCG antibody

نمایندگی انحصاری در ایران: شرکت پاییان آریا بیتا (پاکو) تلفن روابط عمومی: ۰۲۱-۸۸۳۸۲۴۱۸ Email: info@babco.biz



TÜRKLAB TIBBİ MALZEMELER SAN. TİC. A.Ş.
A.O.S.B 10040 Sok. No:20 Çiğli-Izmir / TURKEY
TEL: +90 232 376 80 81 FAX: +90 232 376 80 40
info@turklab.com.tr www.turklab.com.tr



GESAN PRODUCTION s.r.l.
Via Einaudi, 19 91021 TRE FONTANE -
Campobello di Mazara (TP) ITALY

SYMBOLS USED :



Attention: see instruction for use

IVD In vitro diagnostic medical device

For single use only

Lot number Catalog number

Consult instruction for use

Number of test

Storage temperature

Expiry date



" لطفا قبل از انجام آزمایش ، تمام دستور العمل استفاده را با دقت بخوانید."

روش مصرف :

۱ جعبه آزمایش را از درون بسته آلومینیومی محافظ بردارید.




۲

a نمونه ادرار را در ظرف خشک و تمیز بریزید.

با استفاده از قطره چکان موجود در بسته آلومینیومی مقداری از ادرار را بکشید.

b

سه قطره از ادرار را در جای مشخص شده بریزید.

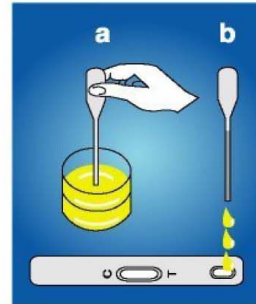

۳

حدود پنج دقیقه صبر کنید و سپس نتیجه را بخوانید.

شرح نتایج :

- هر نتیجه ای که بعد از ۱۵ دقیقه ظاهر شود، نا معتبر است و نباید در نظر گرفته شود. حتی اگر خط T مثبت یا مثبت ضعیف شود.
- دو خطی که ظاهر می شود ممکن است از لحاظ ضخامت و غلظت با یکدیگر یکسان نباشند. یکی از خطوط ممکن است بدلیل مقدار کم hCG ، بسیار نازک و یا بسیار روشن باشد. حتی یک خط قرمز خیلی کمزگر، به عنوان خط دوم ارزیابی می شود.

تنها یک خط قرمز در قسمت "C": "باردار نبودن"

یک خط قرمز در قسمت "C" و یک خط در قسمت "T": "باردار"

هیچ خطی مشاهده نمی شود: "آزمایش نامعتبر"
(هیچ خطی در قسمت "C" و "T" مشاهده نمی شود)

فقط یک خط قرمز در قسمت "T" وجود دارد: "آزمایش نامعتبر"
(هیچ خطی در قسمت "C" مشاهده نمی شود)

شرح بعد از آزمایش:

نتیجه "باردار نبودن": اگر جواب آزمایش عدم بارداری را نشان داد و شما مشکوک به بارداری هستید، آزمایش را چند روز بعد تکرار و با پزشک خود مشورت کنید.
(با پرهیز از اشعه X و غیره از آسیب های احتمالی به جنین جلوگیری کنید)

نتیجه "باردار": فوراً با پزشک خود مشورت کنید تا اطلاعات مورد نیاز در مورد پیشرفت بارداری شما را بررسی کند.
(با پرهیز از اشعه X و غیره از آسیب های احتمالی به جنین جلوگیری کنید)

نتیجه "آزمایش نا معتبر": لطفاً با یک جعبه آزمایش دوباره این را به دقت تکرار کنید و مطمئن شوید که نمونه ادرار به اندازه کافی اضافه شده است. اگر فکر می کنید باردار هستید، با پزشک خود مشورت کنید.

پرسش و پاسخ :

- چگونه این آزمایش ، بارداری را نشان می دهد؟
این آزمایش ترکیبی بنام hCG را در ادرار زنان باردار ، بعد از باروری شناسایی می کند. تشخیص hCG توسط این تست از چهار روز قبل از شروع دوره قاعدگی مورد انتظار، امکان پذیر می باشد.
- می توان این آزمایش را در هر زمانی از روز انجام داد؟
بله، ولی بهتر است اولین ادرار در روز را به دلیل غلظت بیشتر آن استفاده نمایید. (اما ضروری نیست)
- آیا داروهای تجویزی یا غیر تجویزی تأثیری بر نتیجه آزمایش دارند؟
داروهائی که حاوی هورمون hCG می باشند، بروی نتایج آزمایش تأثیر می گذارند. اما داروهای جلوگیری از بارداری، خیر.
- چه موقع می توان آزمایش را انجام داد؟
در هر زمانی، از چهار روز قبل از شروع دوره قاعدگی مورد انتظار.
- آیا مصرف مشروبات الکلی بروی تست تأثیری دارد؟
میزان متوسط الکلی ناشی از بروی نتیجه آزمایش ندارد. اما شما باید توجه داشته باشید که الکل به کودک شما آسیب می رساند و اگر فکر می کنید که باردار هستید ، از مصرف الکل خودداری نمائید.
- حساسیت این تست چه میزان است و این تست دارای چه گواهینامه های استاندارد می باشد؟
میزان حساسیت این تست ۹۹٪ می باشد و دارای گواهی استانداردهای اروپا و FDA آمریکا و وزارت بهداشت و درمان ایران می باشد.